



**5114-RA**  
Separador de coronas



Atención: Siempre deberá trabajarse con refrigeración.


**Separación rápida de coronas, apto para cualquier material, incluyendo el óxido de circonio.**

- La granulometría de 127 $\mu$ m presenta una alta capacidad de corte, permitiendo así la separación rápida de todas las coronas.
- Las partículas de diamante cortan oro, cerámica, aleaciones no preciosas y también óxido de circonio con un solo instrumento.
- El disco simplifica la separación de puentes en boca.
- Con la refrigeración funcionando, resbala sobre la encía, evitando así el riesgo de dañar el borde.

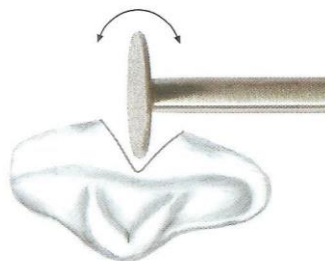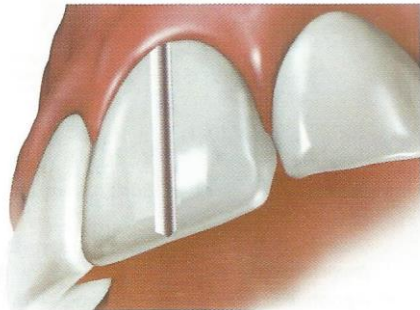

**Importante:**

Es imprescindible realizar los cortes de profundidad en forma de V, es decir, que el corte se abre hacia arriba, para que el disco no se pueda atascar ni romper en caso de que el paciente se mueva durante el corte. No utilizar para forzar coronas (peligro de daños).

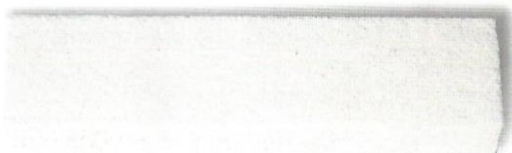

**9920**  
Piedra de limpieza para instrumentos diamantados.